

BROCAS CIRÚRGICAS INTRA-LOCK SYSTEM

INSTRUÇÕES DE USO

BROCAS CIRÚRGICAS INTRA-LOCK SYSTEM (Brocas Cirúrgicas Odontológicas)

NOME COMERCIAL

Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System

Modelos:

Broca lança;
 Broca helicoidal 1.2 mm;
 Broca helicoidal 2.0 mm;
 Broca Trispade 2.5 mm;
 Broca Trispade 2.8 mm;
 Broca Trispade 3.2 mm;
 Broca Trispade 3.5 mm;
 Broca Trispade 4.2 mm;
 Broca Counter Sinking 4.7 mm;
 Broca Multilaminada 5.5 mm;
 Broca Trispade Conic 4.3 mm 10 mm;
 Broca Trispade Conic 4.3 mm 11.5 mm;
 Broca Trispade Conic 4.3 mm 13 mm;
 Broca Trispade Conic 4.3 mm 15 mm;
 Broca Trispade Conic 5.0 mm 10 mm;
 Broca Trispade Conic 5.0 mm 11.5 mm;
 Broca Trispade Conic 5.0 mm 13 mm;
 Broca Trispade Conic 5.0 mm 15 mm;
 Extensor de Brocas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM


As brocas são embaladas individualmente em flaconetes, selados em blister de PET / Tyvec devidamente identificadas e posteriormente armazenadas em caixas de papel cartonado. Para Brocas de maior calibre, é dispensado o flaconete.

Uso exclusivo para profissionais da área Odontológica.

Produto Não Estéril.

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA LANÇA (Lapidada em aço Carbide e revestida por Nitralo de Titânio)	30mm comprimento	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA HELICOIDAL	15mm comprimento ∅ 2.0mm ∅ 2.5mm	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA TRI-SPADE Brocas Tri-Spade Curtas (parte ativa 15 mm)	15mm comprimento ∅ 2.0 mm ∅ 2.2 mm ∅ 2.5 mm ∅ 2.8 mm (amarelo) ∅ 3.15 mm (azul) ∅ 3.5 mm (verde) ∅ 3.65 mm (verde)	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA COUNTER SINKING	29.3mm comprimento ∅ 4.7mm	


BROCAS CIRÚRGICAS INTRA-LOCK SYSTEM

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA TRI-SPADE CONIC 5.0 (azul)	10mm 11.5mm 13mm 15mm 18mm comprimento	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA TRI-SPADE CONIC 4.3 (magenta)	10mm 11.5mm 13mm 15mm 18mm comprimento	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA 4.2mm	15mm comprimento	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
BROCA 5.5 mm	15mm comprimento	

MODELO	TAMANHO	IMAGEM
EXTENSOR DE BROCAS (Com dispositivo de irrigação interna, em aço inox)	30mm comprimento	

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System são indicadas para preparo do leito ósseo para a instalação de implantes dentários.

As Brocas Cirúrgicas fazem parte do sistema INTRA-LOCK SYSTEM. Deste grupo de instrumentais fazem parte Broca Lança, Brocas Helicoidais, Brocas Tri-Spade, Brocas Counter Sinking, Brocas Tr-Spade Conic, Broca Multilaminada e Extensor de Brocas. Fabricadas em instrumento de aço inoxidável, são indicadas para a perfuração óssea para a instalação de implantes em parafuso com modelos, diâmetros e comprimentos diferentes possibilitando ao profissional escolher a mais adequada para cada caso.

Uso exclusivo para profissionais da área Odontológica.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System são utilizadas para o preparo do leito ósseo para instalação de implantes dentários.

MODO DE USO DO PRODUTO

As brocas são acopladas em contra-ângulos com redução de velocidade acionados por motores de uso implantológico, seguindo os parâmetros clássicos da cirurgia implantológica.

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos vigentes de limpeza de instrumental, de autoclavagem e biossegurança.

Não utilizar a embalagem original para a esterilização do produto.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System devem ser esterilizadas em autoclave antes do uso. Não utilizar a embalagem original para a esterilização do produto.

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System não deverão ser utilizadas caso apresente qualquer tipo de irregularidade, ou seja, danificada; devem ser evitadas forças laterais durante a perfuração, bem como compressão excessiva.

Sempre que as Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System forem ser utilizadas atentar para a advertência que os mesmos deverão ser previamente esterilizados.

BROCAS CIRÚRGICAS INTRA-LOCK SYSTEM

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System devem ser sempre manuseadas com cuidado para que a mesmas nunca caiam sobre suas pontas.

Após o uso as Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System deverão ser limpas em ultrassom com detergentes aniônicos, em seguida serem lavadas em água corrente para posterior secagem que precede novo ciclo em autoclave.

Para a correta limpeza de instrumentais recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

Para o DESCARTE: Havendo perda total do instrumento, o mesmo deverá ser descartado de forma apropriada: recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente .

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos vigentes para autoclavagem e biossegurança.

Não utilizar a embalagem original na esterilização.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado

COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável grau cirúrgico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O aço inoxidável não exige condições especiais de armazenamento. Recomenda-se apenas que os instrumentos sejam protegidos de impactos para maior durabilidade; armazenar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries..

CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE

O produto deve transportado de forma que se evitem impactos que possam reduzir sua durabilidade.

ADVERTÊNCIAS

Produto Não Estéril - Esterilizar, antes do uso, de acordo com o procedimento padrão.

Produto Exclusivo para Uso Odontológico.

O produto deve ser utilizado somente por profissionais da área, devidamente capacitados e habilitados para a execução de tais procedimentos de acordo com as normas e práticas adequadas.

PRECAUÇÕES

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos vigentes para autoclavagem e biossegurança.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não aplicável

As Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System não apresentam contra-indicações desde que seguidas suas recomendações corretamente e utilizadas por profissional especializado.

EFEITOS ADVERSOS

Não aplicável.

Não são esperados efeitos adversos desde que as Brocas Cirúrgicas Intra-Lock System sejam utilizadas seguindo corretamente suas recomendações e utilizadas por profissional especializado.

Fabricante: Intra-Lock Indústria Comércio de Importação
Exportação de Produtos Implantológicos Ltda
Rua Monte Alegre 173 São Paulo SP Brasil
CEP 05014-000

www.intra-lock.com.br

intra-lock@intra-lock.com.br

Telefone 011 3677-0122

Registro ANVISA MS 10352710013

Responsável Técnico: Aziz Constantino
CROSP 27.888

