

## CHAVES CATRACA INTRA-LOCK SYSTEM

### INSTRUÇÕES DE USO

#### CHAVES CATRACA INTRA-LOCK SYSTEM

#### DADOS DO PRODUTO

#### NOME COMERCIAL

Chaves Catraca Intra-Lock System

#### NOME TÉCNICO

Instrumento Cirúrgico para Implante Dentário  
Modelos:

Chave Catraca Intra-Lock System  
Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System  
Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System

#### FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM

As Chaves Catracas Intra-Lock System são embaladas individualmente em sacos tyvek devidamente identificadas.  
Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System são embaladas individualmente e armazenadas em caixas de papel cartonado devidamente identificadas  
Produto Não Estéril.

Chave Catraca Intra-Lock System



Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System



Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System



#### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

#### INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

A Chave Catraca Intra-Lock System é utilizada para aplicação direta de carga rotacional manualmente;  
A Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e a Chave Torquímetro Desmontável Intra-lock System são utilizadas para aplicação direta de

carga rotacional manualmente com dispositivo de medição de torque.

#### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

Tratam-se de instrumentos metálicos para aplicação de cargas manuais transmitidas para o implante e ou componente protético de implante através de chaves diversas, sendo que a Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e a Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System apresentam dispositivos de medição de torque .

#### MODO DE USO DO PRODUTO

A Chave Catraca Intra-Lock System é acoplada a chaves diversas com aplicação de força manual, sendo que a Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e a Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System apresentam dispositivos de medição de torque.

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos clássicos de autoclavagem e biossegurança

Para uso da Chave Torquímetro Desmontável Intra-Lock System: segure a barra de torção e puxe enquanto aplica pressão para baixo no conjunto do adaptador / cabeça. E leia o torque em Ncm.



## CHAVES CATRACA INTRA-LOCK SYSTEM

### CONDIÇÕES PARA O TRANSPORTE

O produto deve transportado de forma que se evitem impactos que possam reduzir sua durabilidade.

### CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

A Chave Catraca Intra-Lock System, Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e Chave Catraca A Chave Catraca Intra-Lock System, Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System devem ser esterilizadas em autoclave antes do uso. Após o uso deverão ser limpas em ultrassom com detergentes aniônicos, em seguida ser lavado em água corrente para posterior secagem que precede novo ciclo de esterilização em autoclave.

Para limpeza e manutenção da Chave Torquímetro Desmontável Intra-Lock System : Simplesmente pressione a Liberação da Cabeça puxando simultaneamente a cabeça para fácil remoção. Limpe e esterilize o conjunto da cabeça, o driver do adaptador e a barra de torção separadamente.



Sempre que as Chaves Catraca Intra-Lock System forem ser utilizadas atentar para a advertência que os mesmos deverão ser previamente esterilizados Para a correta limpeza de instrumentais recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

Para o DESCARTE: Havendo perda total do instrumento, o mesmo deverá ser descartado de forma apropriada: recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente .

### PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado

### MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizáveis em autoclave

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos clássicos de autoclavagem e biossegurança

### COMPOSIÇÃO

A Chave Catraca Intra-Lock System, Chave Catraca Torquímetro Intra-Lock System e a Chave Catraca Torquímetro Desmontável Intra-Lock System são fabricadas em aço inoxidável 455.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O aço inoxidável não exige condições especiais de armazenamento. Recomenda-se apenas que os instrumentos sejam protegidos de impactos para maior durabilidade; armazenar em local arejado,

seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries

### ADVERTENCIAS

Produto Exclusivo para Uso Odontológico.

Produto Não Estéril - Esterilizar, antes do uso, de acordo com o procedimento padrão.

Evitar quedas e impactos.

O produto deve ser utilizado somente por profissionais da área, devidamente capacitados e habilitados para a execução de tais procedimentos de acordo com as normas e práticas adequadas.

### PRECAUÇÕES

Produto Não Estéril – esterilizar antes do uso seguindo os protocolos vigentes para autoclavagem e biossegurança.

### CONTRA-INDICAÇÕES

Não se aplica.

As Chaves Catraca Intra-Lock System não apresentam contraindicações desde que seguidas suas recomendações corretamente e utilizadas por profissional especializado.

### EFEITOS ADVERSOS

Não se Aplica.

Não são esperados efeitos adversos desde que as Chaves Catraca Intra-Lock System sejam utilizadas seguindo corretamente suas recomendações e utilizadas por profissional especializado

## CHAVES CATRACA INTRA-LOCK SYSTEM

Fabricante: Intra-Lock Indústria Comércio de Importação  
Exportação de Produtos Implantológicos Ltda  
Rua Monte Alegre 173 São Paulo SP Brasil CEP 05014-  
000

[www.intra-lock.com.br](http://www.intra-lock.com.br)

[intra-lock@intra-lock.com.br](mailto:intra-lock@intra-lock.com.br)

Telefone 011 3677-0122

**Registro ANVISA nº:** 10352710015

**Responsável Técnico:** Aziz Constantino CROSP nº  
27.888

